


Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System
passend zu **Amistem** (Medacta)

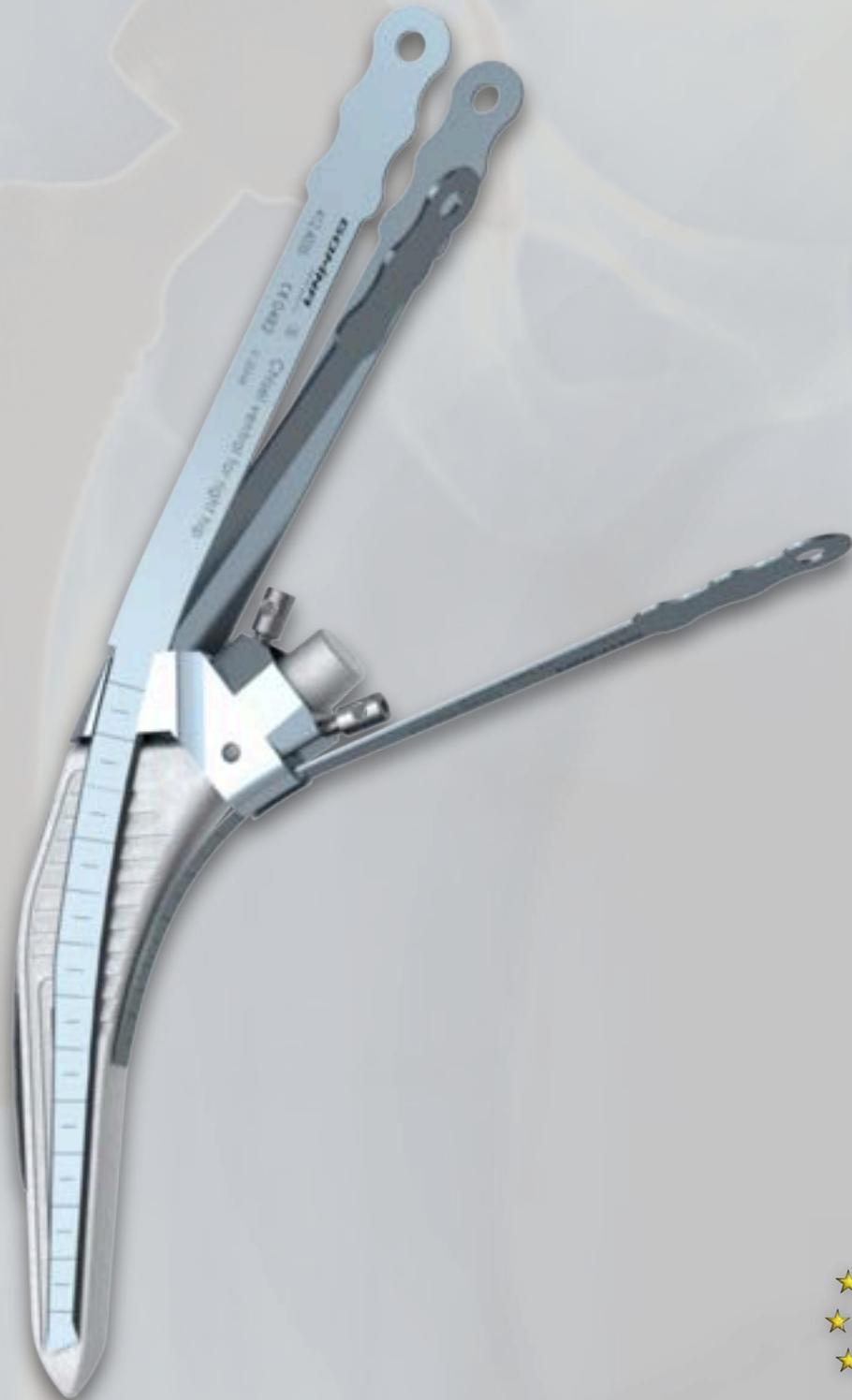

Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

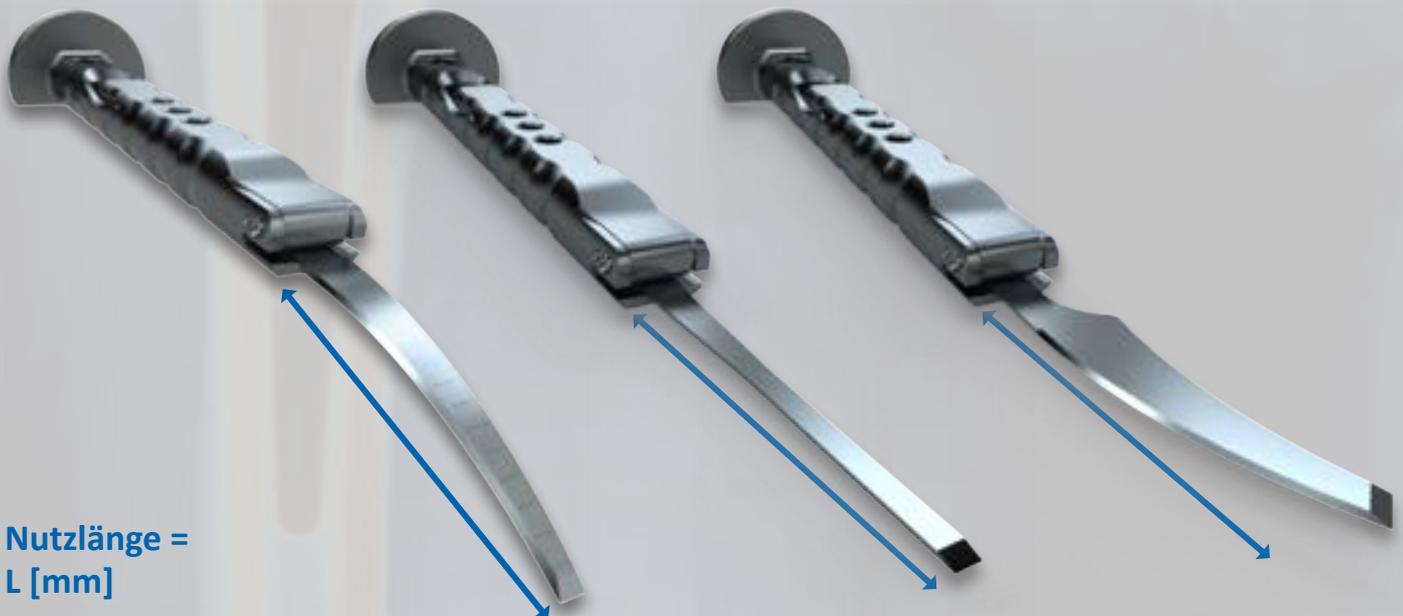

Nutzlänge =
L [mm]

Schablone

Führungsrillen

Führungsrillen




Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsrillen der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch die Führungsrillen geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.

Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit den beiden Fixierschrauben befestigt.



Bei standard Schäften muss zuerst die *mediale* Fixierschraube komplett eingeschraubt werden. Danach die *laterale* Schraube einschrauben bis sie durch Kontakt mit dem Schaft die Schablone fixiert. (Bild 1)


Bei lateralisierten Schäften zuerst die *laterale* Fixierschraube komplett einschrauben. Dann die *mediale* Schraube einschrauben bis sie die Schablone fixiert. (Bild 2)

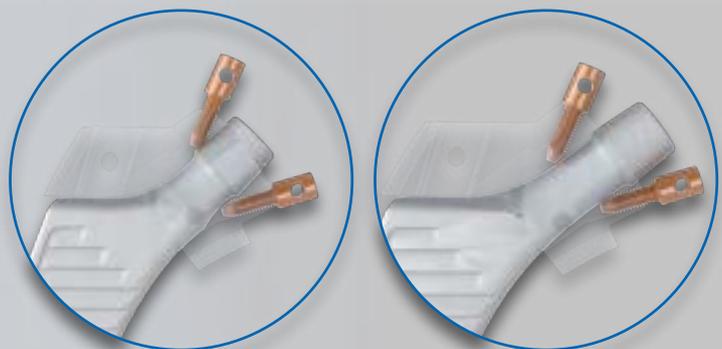

GOMINA
SWISS QUALITY

Übersicht Meissel mit Schablone

**Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.*

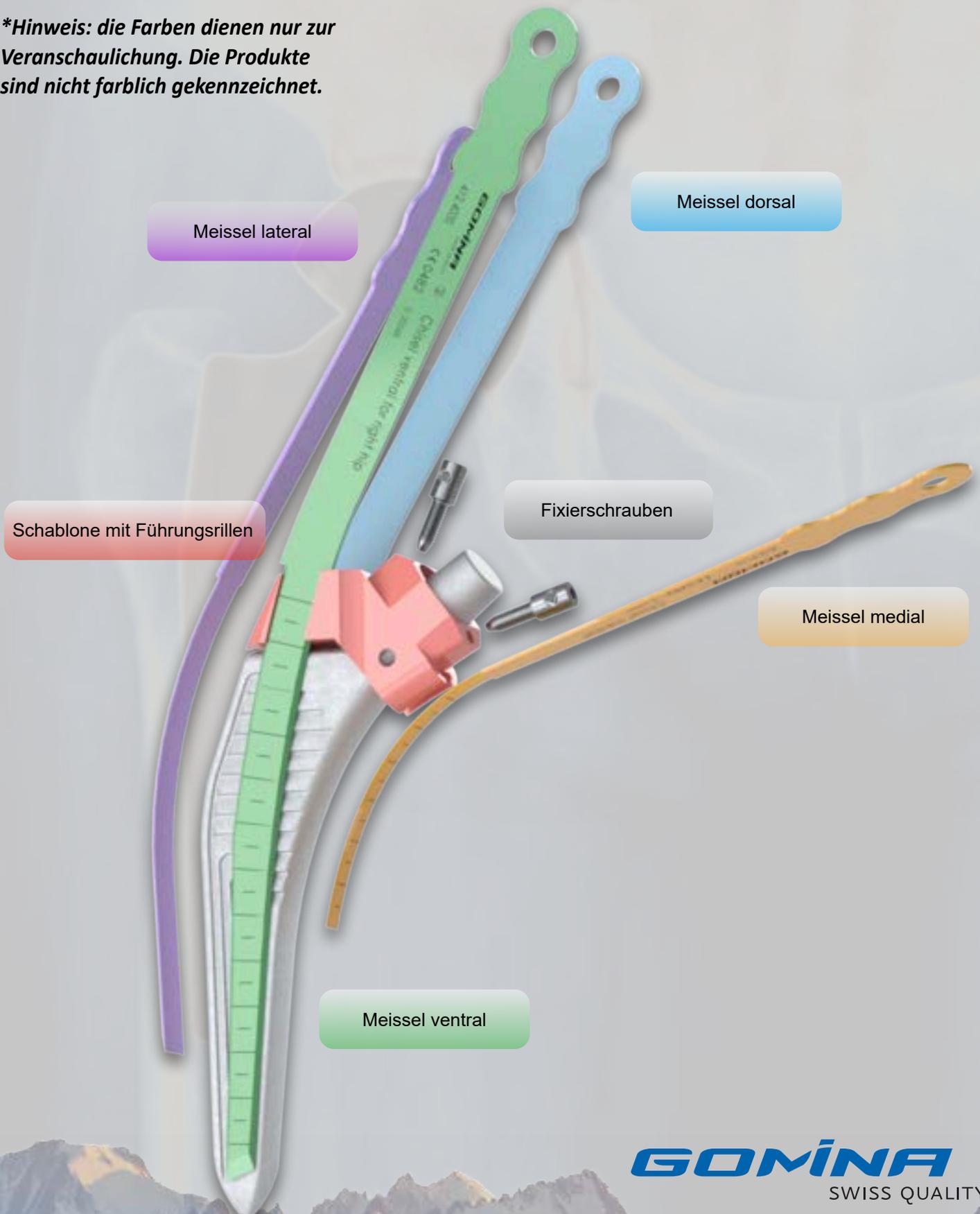

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 0, 1



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

413.201S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	----------------------------------	-------	-----	------



412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	---------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



413.901	Schablone
----------------	-----------



400.101	Fixierschraube
----------------	----------------



400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 2, 3



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

413.202S	Meissel lateral	137.5	7.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



413.902	Schablone
----------------	-----------



400.101	Fixierschraube
----------------	----------------



400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 4, 5



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

413.203S	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	----------------------------------	-------	-----	------



412.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	---------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



413.903	Schablone
----------------	-----------



400.101	Fixierschraube
----------------	----------------



400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 6, 7



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

413.203S	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.409S	Meissel ventral für rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
-----------------	----------------------------------	-------	-----	------



412.410S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
-----------------	---------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



413.904	Schablone
----------------	-----------



400.101	Fixierschraube
----------------	----------------



400.106	Inbusschlüssel
----------------	----------------

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Amistem Schaftgrössen 8, 9



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

413.203S Meissel lateral 143.5 9.0 1.19



413.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19



412.409S Meissel ventral für rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19



412.410S Meissel dorsal für rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



413.905 Schablone



400.101 Fixierschraube



400.106 Inbusschlüssel

Gesamtübersicht Artikelnummern


	Amistem Schaftgrößen	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
	Alle Grössen	400.001	Handgriff inkl. Ausschlagbolzen			
	Alle Grössen	400.100	Ausschlagbolzen (Ersatzteil)			
	0/1	413.201S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
	2/3	413.202S	Meissel lateral	137.5	7.8	1.19
	4/5/6/7/8/9	413.203S	Meissel lateral	143.5	9.0	1.19
	Alle Grössen	413.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
	0/1	412.401S	Meissel ventral rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
	0/1	412.402S	Meissel dorsal rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
	2/3/4/5	412.403S	Meissel ventral rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
	2/3/4/5	412.404S	Meissel dorsal rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
	6/7/8/9	412.409S	Meissel ventral rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
	6/7/8/9	412.410S	Meissel dorsal rechte Hüfte	200.3	6.1	1.19
		0/1	413.901	Schablone		
2/3		413.902	Schablone			
4/5		413.903	Schablone			
6/7		413.904	Schablone			
8/9		413.905	Schablone			
	Alle Grössen	400.101	Fixierschraube			
	Alle Grössen	400.106	Inbusschlüssel			



Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch

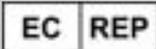

GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2024-11
Zuletzt aktualisiert: 15.11.2024

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos[®] PRECISE
MEDICAL
DEVICES

GOMINA
SWISS QUALITY