

Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System

passend zu **Corail®** (DePuy Synthes)



Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

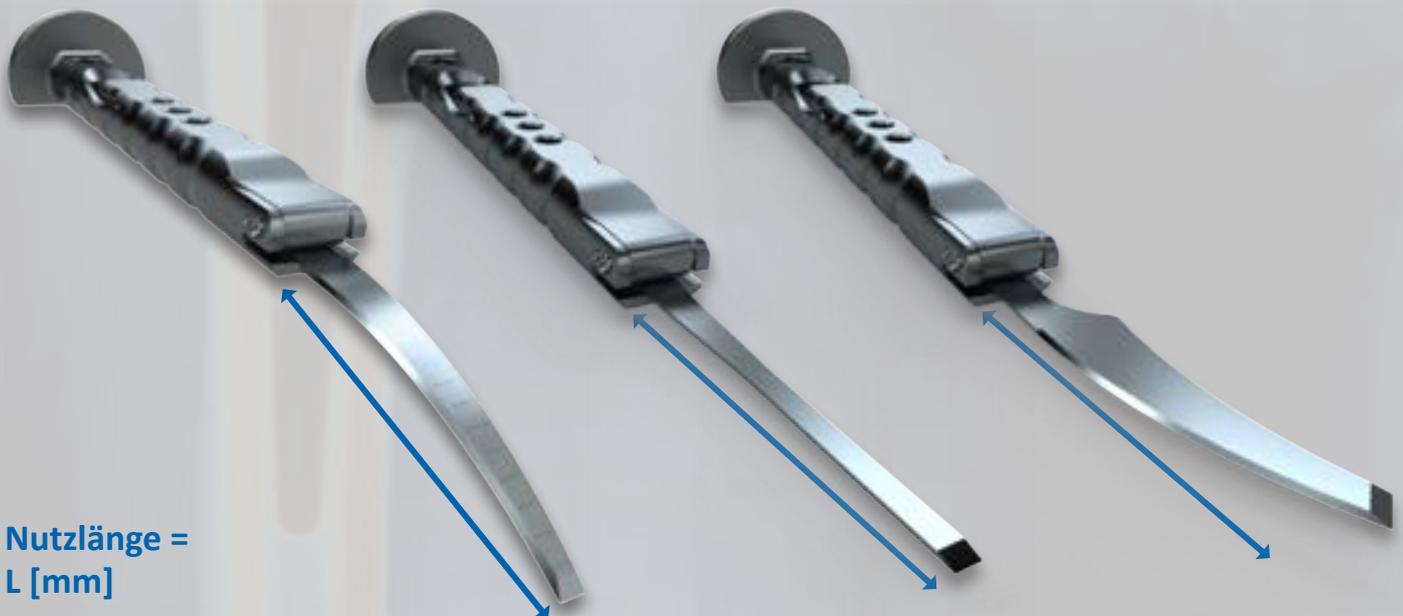

Nutzlänge =
L [mm]

Schablone

Führungsschlitze

Führungsrillen



Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsschlitze der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch beide Führungsschlitze (bzw. Rillen) geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.


Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit der Fixierschraube befestigt.



Die Schablone muss in lateral-medialer Richtung korrekt auf dem Schaft positioniert werden, bevor sie mithilfe der Schraube fixiert wird. Als Referenz wird der laterale Führungsschlitz verwendet.

Übersicht Meissel mit Schablone

**Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.*

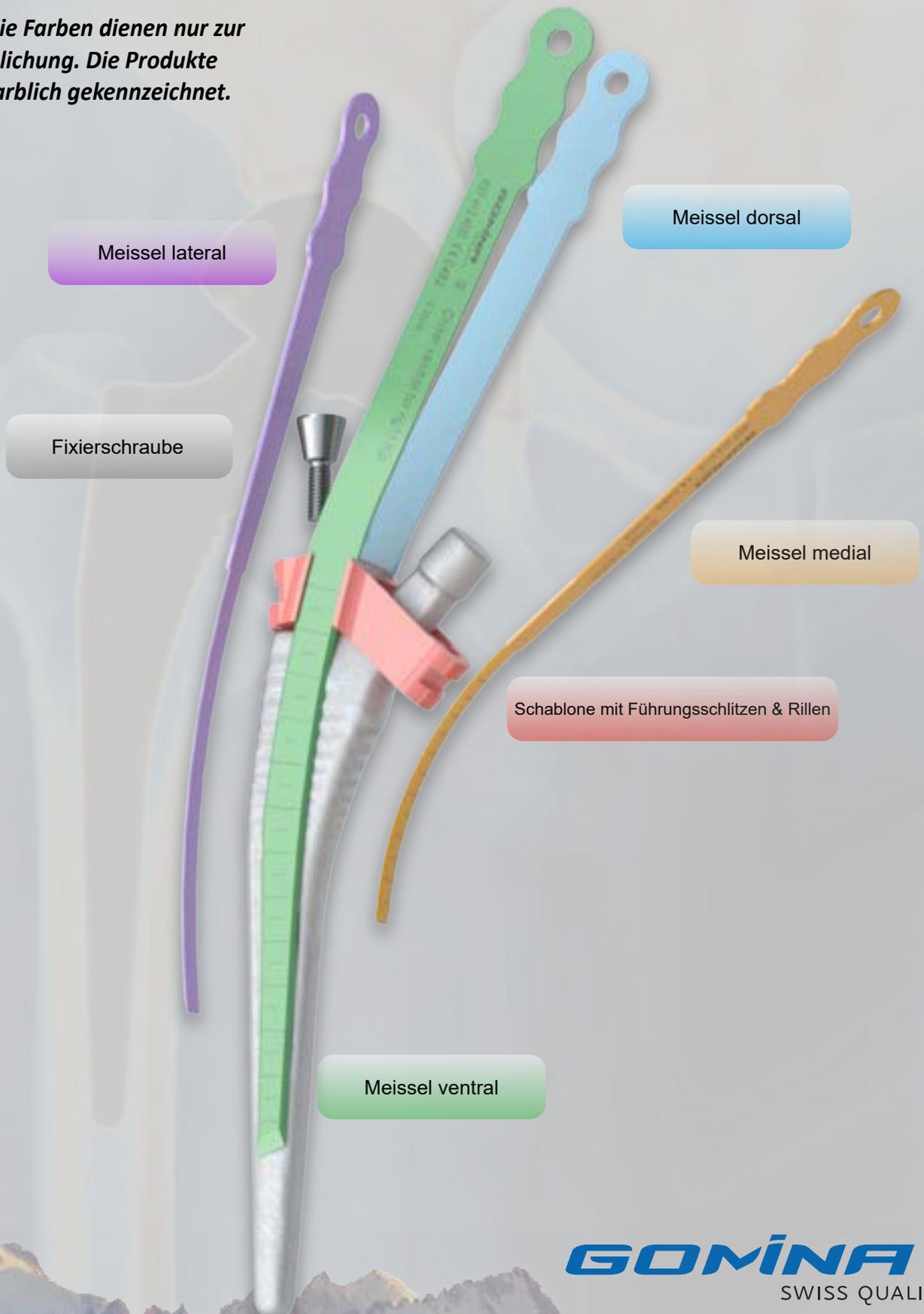

Meissel lateral

Meissel dorsal

Fixierschraube

Meissel medial

Schablone mit Führungsschlitz & Rillen

Meissel ventral

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **08, 09, 10**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.201S	Meissel lateral	133.0	4.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.901	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **11, 12, 13**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.202S Meissel lateral 138.0 6.0 1.19



412.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19



412.403S Meissel ventral für rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19



412.404S Meissel dorsal für rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.903 Schablone



400.102 Fixierschraube



400.104 (kurz) Inbusschlüssel
400.107 (lang)

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **14, 15, 16**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.202S Meissel lateral 138.0 6.0 1.19



412.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19



412.405S Meissel ventral für rechte Hüfte 215.3 7.4 1.19



412.406S Meissel dorsal für rechte Hüfte 215.3 7.4 1.19

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.905 Schablone



400.102 Fixierschraube



400.104 (kurz) Inbusschlüssel
400.107 (lang)

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **18, 20**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.407S	Meissel ventral für rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.408S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.907	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **08, 09, 10**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.201S	Meissel lateral	133.0	4.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.909	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **11, 12, 13**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.910	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **14, 15, 16**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.405S	Meissel ventral für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.406S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.911	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **18, 20**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------



412.202S Meissel lateral 138.0 6.0 1.19



412.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19



412.407S Meissel ventral für rechte Hüfte 233.5 9.7 1.19



412.408S Meissel dorsal für rechte Hüfte 233.5 9.7 1.19

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.912 Schablone



400.102 Fixierschraube



400.104 (kurz) Inbusschlüssel
400.107 (lang)

GOMINA
SWISS QUALITY

Gesamtübersicht Artikelnummern



Corail® Schaftgrössen	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
-----------------------	------------	--------------------	--------	--------	--------

Alle Grössen 400.001 Handgriff inkl. Ausschlagbolzen

Alle Grössen 400.100 Ausschlagbolzen (Ersatzteil)



08/09/10 412.201S Meissel lateral 133.0 4.8 1.19

11/12/13/14/15/16/18/20 412.202S Meissel lateral 138.0 6.0 1.19



Alle Grössen 412.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19

08/09/10 412.401S Meissel ventral rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

08/09/10 412.402S Meissel dorsal rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19



11/12/13 412.403S Meissel ventral rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19

11/12/13 412.404S Meissel dorsal rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19

14/15/16 412.405S Meissel ventral rechte Hüfte 215.3 7.4 1.19

14/15/16 412.406S Meissel dorsal rechte Hüfte 215.3 7.4 1.19

18/20 412.407S Meissel ventral rechte Hüfte 233.5 9.7 1.19

18/20 412.408S Meissel dorsal rechte Hüfte 233.5 9.7 1.19

08/09/10 412.901 Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

11/12/13 412.903 Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

14/15/16 412.905 Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)



18/20 412.907 Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

08/09/10 412.909 Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

11/12/13 412.903 Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

14/15/16 412.905 Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

18/20 412.907 Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)



Alle Grössen 400.102 Fixierschraube



Alle Grössen 400.104 (kurz)
400.107 (lang) Inbusschlüssel

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
info@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2024-11
Zuletzt aktualisiert: 14.11.2024

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos[®] PRECISE
MEDICAL
DEVICES

GOMINA
SWISS QUALITY